

Phonak TVLink II



Quick setup guide / Schnellstartanleitung

Guide d'installation rapide / Stručný návod k použití




PHONAK
life is on



Components
Komponenten
Composants
Komponenty

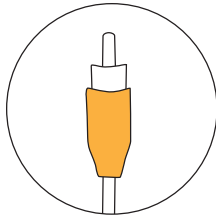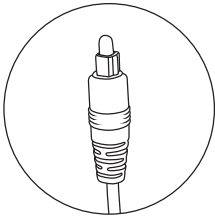

Optický kabel Koaxiální kabel

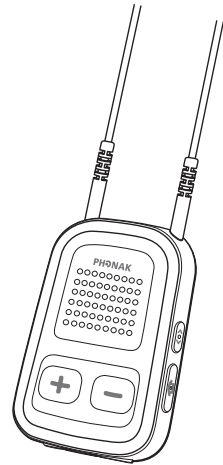

ComPilot II

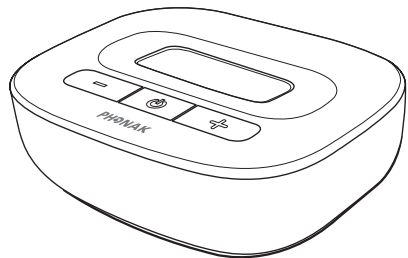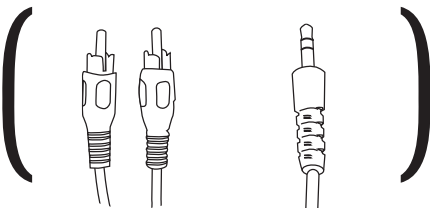



Phonak TVLink II
základna

Connect power and audio cable


Netzteil und Audio-Kabel anschliessen

Connectez le câble d'alimentation et le câble audio

Zapojte síťový a audio kabel

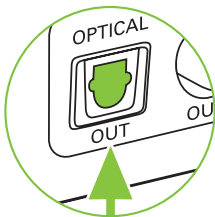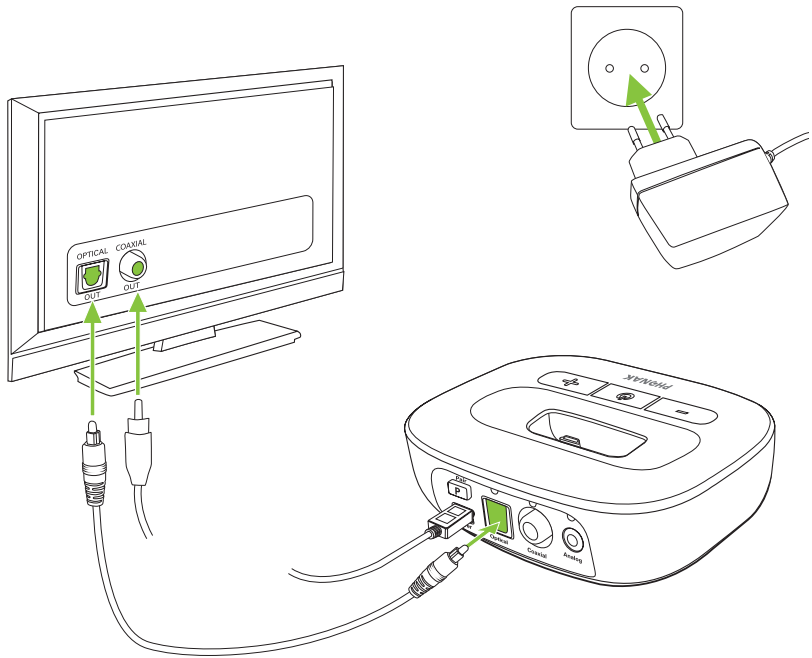

or
oder
ou
nebo

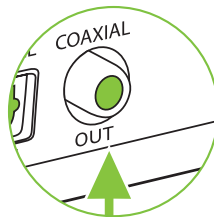


2

Charge 1 hour




1 Stunde laden

Chargez 1 heure


Nabijte zařizení (1 hodina)

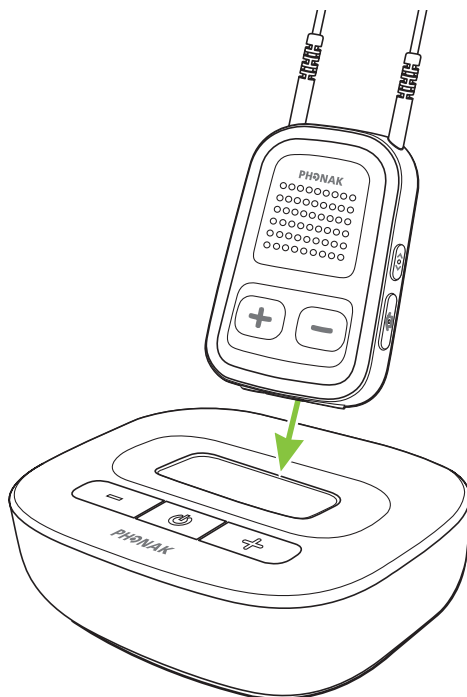



Wearing ComPilot II
ComPilot II tragen
Portez ComPilot II
Nošení zařízení ComPilot II

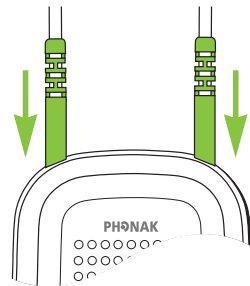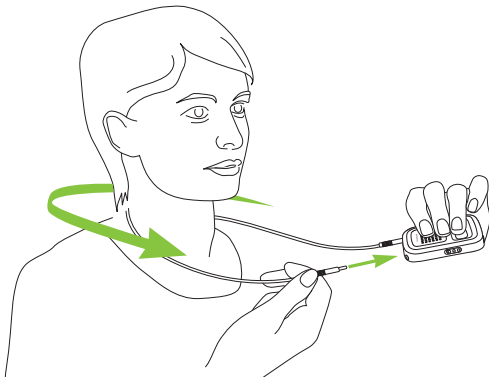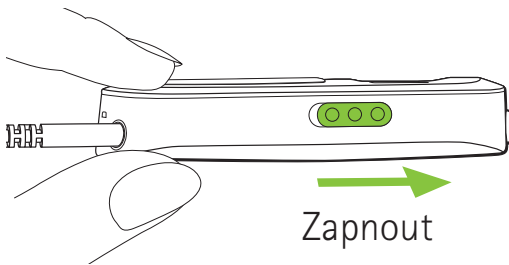

Switch on TVLink II
TVLink II einschalten
Mettez TVLink II en marche
Zapněte zařízení TVLink II

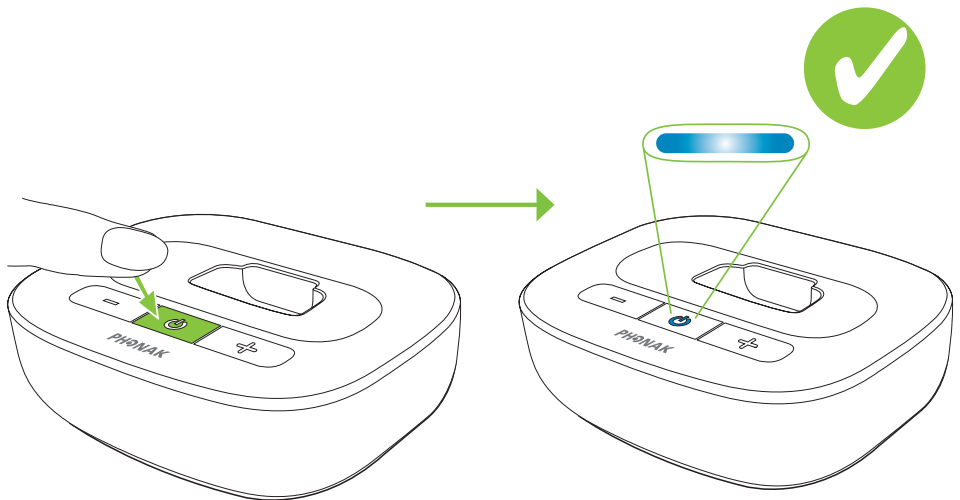

Usage
Benützung
Utilisation
Používání

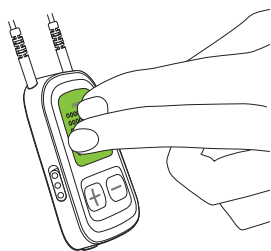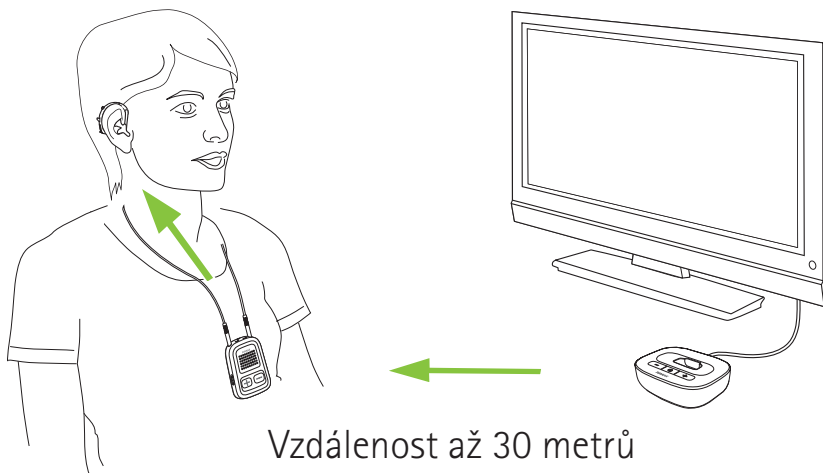

Pause / Resume
Pause / Abspielen
Pause / Diffuser
Přerušit / Pokračovat



Volume setting
Lautstärke einstellen
Réglage de volume
Nastavení hlasitosti



The Phonak TVLink II user guide will give you detailed information about the installation.

Die Phonak TVLink II Gebrauchsanweisung informiert detailliert über die Installation.

Le mode d'emploi Phonak TVLink II vous donne des informations détaillées sur l'installation.

Podrobné informace k používání zařízení Phonak TVLink II najdete v příslušné uživatelské příručce.



ON
Ein
Marche
Zapnuto



No audio signal
Kein Audiosignal
Pas de signal audio
Bez zvukového signálu



Audio transmission
Tonübertragung
Transmission audio
Přenos zvuku



Pause
Pause
Pause
Přerušeni přenosu



Pairing
Koppeln
Couplage
Párování

Servis a záruka

Na výrobek je poskytována záruční doba v souladu s platným občanským zákoníkem ČR, která vstupuje v platnost v den nákupu.

Tato záruka zahrnuje jakékoliv opravy způsobené vadami materiálu a/nebo zpracováním. Tato záruka nezahrnuje poškození způsobené běžným opotřebením, nesprávnou manipulací, vystavením působení chemických látek, ponořením do vody nebo nepřiměřenou zátěží. Poškození způsobené okolnostmi jako např. pádem na zem, vypráním, rozšlápnutím, rozkousáním od zvířete, vysoušením v mikrovlnné troubě apod. není předmětem poskytnuté záruky. Poškození způsobené zásahem neoprávněných servisních center nebo jiných neoprávněných osob do přístroje činí záruku neplatnou. Tato záruka se nevztahuje na servisní zásahy provedené poskytovatelem zařízení v jeho provozovně.

Záruční list musí být řádně a čitelně vyplněn včetně data zakoupení, podpisu a razítka výdejny.

Tato záruka se vztahuje na výrobky značky Phonak uvedené níže:

Sériové číslo zařízení: _____

Datum zakoupení: _____

Podpis a razítko prodejce: _____

Distributor

REJA spol. s r. o.

Sídlo:

Dolní náměstí 305/21

746 01 Opava

IČ: 44738706

zapsána v registru obchodního rejstříku vedeného
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, spisová značka 2714

Centrální místo pro záruční a pozáruční servis:

REJA spol. s r. o., Příkop 843/4, 602 00 Brno

tel.: 513 033 852

web: www.reja.cz

e-mail: helpdesk.phonak@reja.cz, servis.phonak@reja.cz

Kontaktní a servisní formuláře:

www.reja.cz

www.sluchadla-deti.cz

Doplňky pro sluchadla:

baterie, čisticí prostředky, dálková ovládání,
příslušenství pro poslech televize, telefonování,
bezdrátovou komunikaci a jiné

www.audiodum.cz

© Kopírování části a/nebo celé této příručky je možné pouze se souhlasem společnosti
REJA spol. s r. o.

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
Prohlášení o shodě

Společnost Phonak AG se sídlem Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa, Švýcarsko tímto na svou vlastní zodpovědnost prohlašuje, že:

- výrobek Phonak TVLink II je v souladu se směrnicí 2014/53/EU o rádiových zařízeních,
- zdravotnický prostředek ComPliot II je v souladu se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a směrnicí 2014/53/EU o rádiových zařízeních.

Poznámky

Autorizovaný prodejce:



Distributor pro Českou republiku:

REJA spol. s r. o.

www.reja.cz

www.phonak.cz

www.sluchadla-deti.cz

www.komunikacnisystem.cz

www.audiodum.cz



Výrobce:

Phonak AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Švýcarsko

www.phonak.com

029-0319-Czech/V1.00/2021-05/A+W/SB © Sonova AG All rights reserved

