

Roger MyLink

Quick setup guide / Schnellstartanleitung

Guide d'installation rapide / Stručný návod k použití




roger



PHONAK
life is on

Components
Komponenten
Composants
Komponenty

Roger MyLink

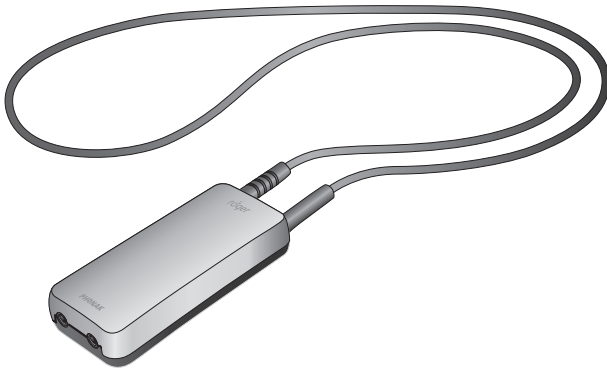


Napájení





1

Charging Roger MyLink
Roger MyLink aufladen
Charger Roger MyLink
Nabíjení zařízení Roger MyLink

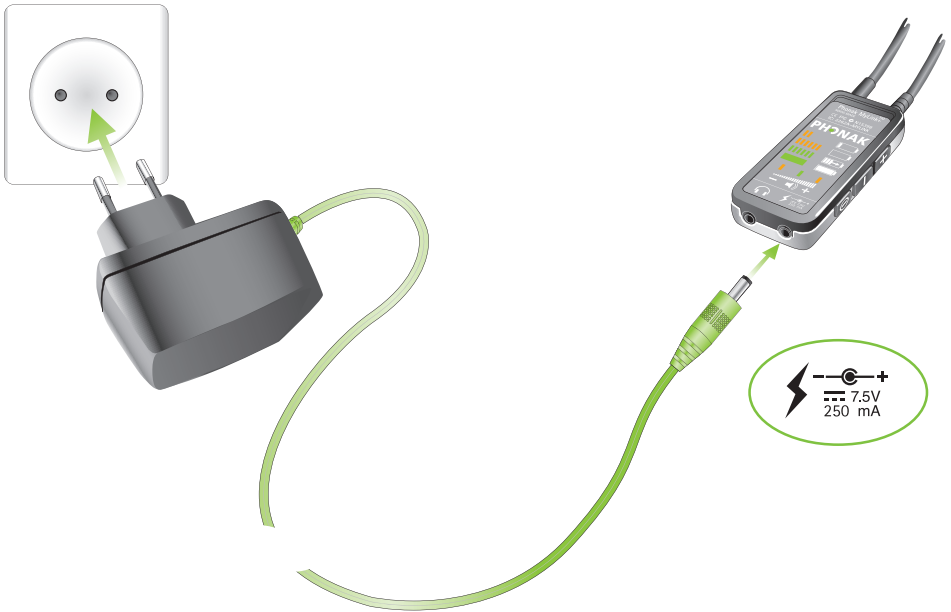


Wearing Roger MyLink
 Roger MyLink tragen
 Porter Roger MyLink
 Nošení zařízení Roger MyLink

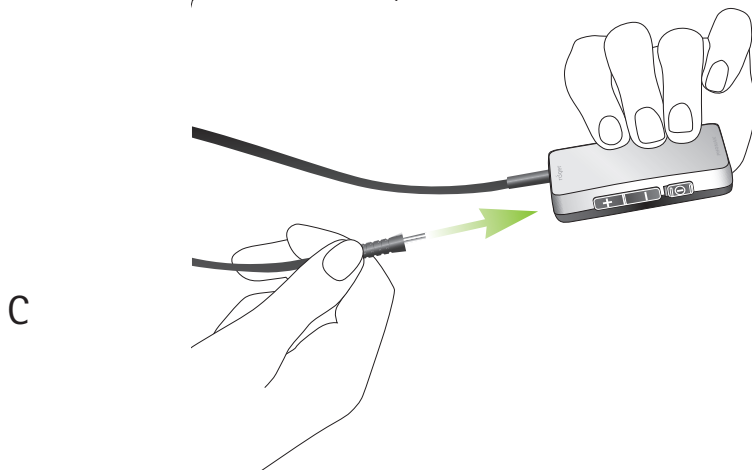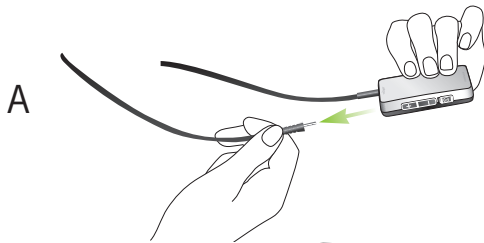

Switching on Roger MyLink and its Roger microphone
Roger MyLink und Roger-Mikrofon einschalten
Mise en marche du Roger MyLink et du Roger microphone
Zapnutí zařízení Roger MyLink a jeho mikrofonu Roger

A

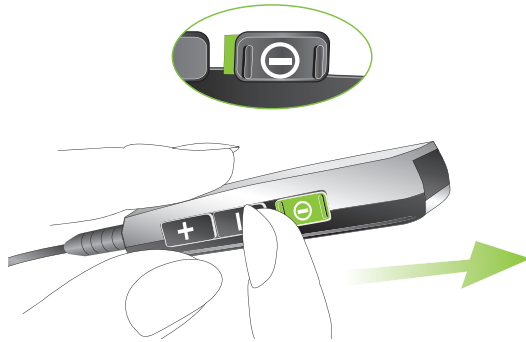


B





Activate the T-Coil program in your hearing aid
Telefonspule im Hörgerät aktivieren
Activer le programme T-Coil de votre aide auditive
Aktivujte program na T-cívce ve svém sluchadle



T/MT

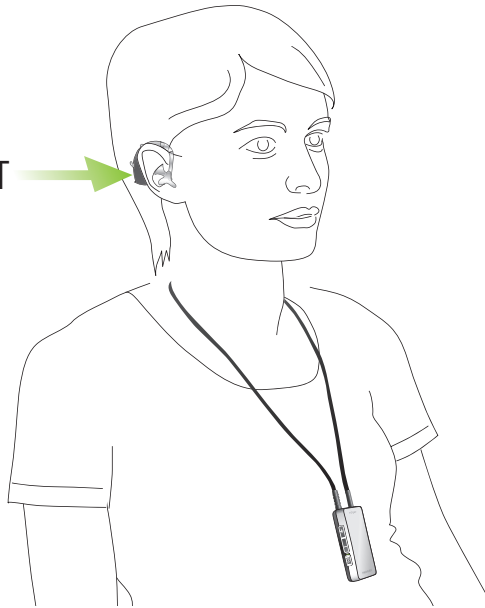


Adjust the volume
Lautstärke einstellen
Réglage du volume
Nastavte hlasitost

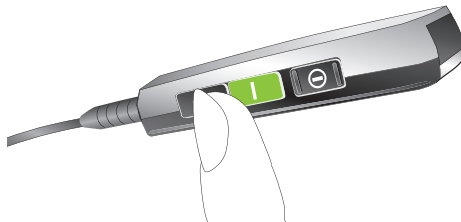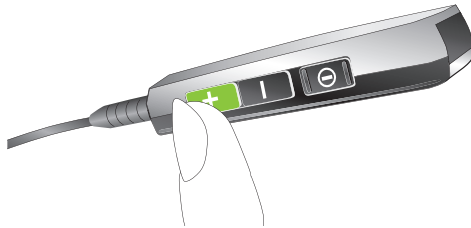




Connect Roger MyLink to your Roger microphone
Verbinden Sie Roger MyLink mit Ihrem Roger Mikrofon
Connecter Roger MyLink avec votre Roger microphone
Připojte zařízení Roger MyLink ke svému mikrofonu

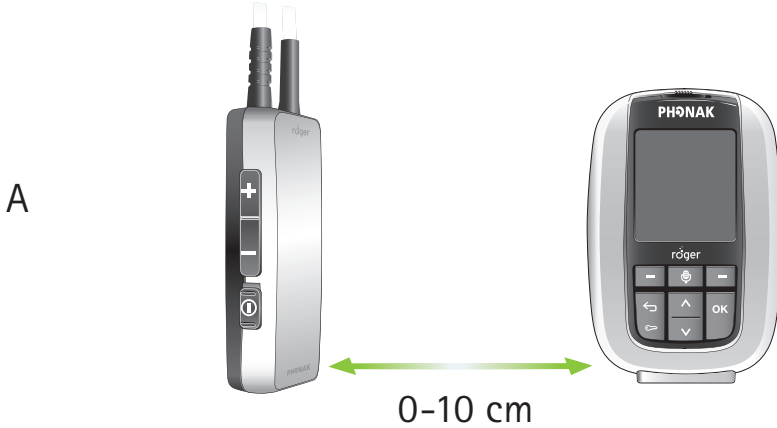

Roger MyLink is not compatible with FM transmitters
Roger MyLink Funktioniert nicht mit FM Sender
Roger MyLink n'est pas compatible avec des émetteurs FM
Roger MyLink není kompatibilní s FM přijímači



End

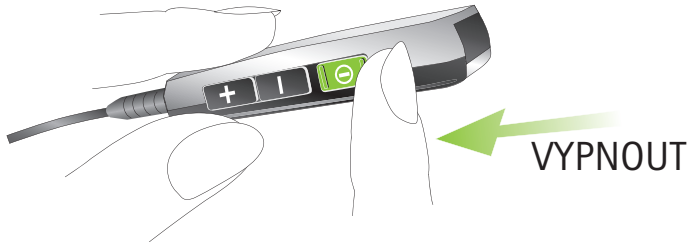

The Roger MyLink user guide will give you detailed information about the setup.

Die Roger MyLink Gebrauchsanweisung informiert detailliert über den Gebrauch.

Le mode d'emploi Roger MyLink vous donnera des informations détaillées sur l'utilisation.

Podrobné informace k používání zařízení Roger MyLink najdete v příslušné uživatelské příručce.

Servis a záruka

Na výrobek je poskytována záruční doba v souladu s platným občanským zákoníkem ČR, která vstupuje v platnost v den nákupu.

Tato záruka zahrnuje jakékoliv opravy způsobené vadami materiálu a/nebo zpracováním. Tato záruka nezahrnuje poškození způsobené běžným opotřebením, nesprávnou manipulací, vystavením působení chemických látek, ponořením do vody nebo nepřiměřenou zátěží. Poškození způsobené okolnostmi jako např. pádem na zem, vypráním, rozšlápnutím, rozkousáním od zvířete, vysoušením v mikrovlnné troubě apod. není předmětem poskytnuté záruky. Poškození způsobené zásahem neoprávněných servisních center nebo jiných neoprávněných osob do přístroje činí záruku na výrobek značky Phonak neplatnou. Tato záruka nezahrnuje žádné služby provedené poskytovatelem zařízení v jeho provozovně.

Záruční list musí být řádně a čitelně vyplněn včetně data zakoupení, podpisu a razítka výdejny.

Tato záruka se vztahuje na výrobky značky Phonak uvedené níže:

Sériové číslo zařízení: _____

Datum zakoupení: _____

Podpis a razítko poskytovatele: _____

Distributor

REJA spol. s r. o.

Sídlo:

Dolní náměstí 305/21

746 01 Opava

IČ: 44738706

zapsána v registru obchodního rejstříku vedeného
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, spisová značka 2714

Centrální místo pro záruční a pozáruční servis:

REJA spol. s r. o., Příkop 843/4, 602 00 Brno

tel.: 513 033 852

web: www.reja.cz

e-mail: helpdesk.phonak@reja.cz, servis.phonak@reja.cz

Facebook: [@Phonak CZ](#), You Tube: [Phonak CZ/SK](#)

Kontaktní a servisní formuláře:

www.reja.cz

www.sluchadla-deti.cz

Doplňky pro sluchadla: baterie, čisticí prostředky,
dálková ovládání, příslušenství pro poslech televize,
telefonování, bezdrátovou komunikaci a jiné
www.audiodum.cz

© Kopírování části a/nebo celé této příručky je možné
pouze se souhlasem společnosti REJA spol. s r. o.

Prohlášení o shodě

Společnost Sonova Communications AG tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se směrnicí pro rádiová zařízení 2014/53/EU. Plný text evropského prohlášení o shodě lze získat od výrobce, místního zástupce značky Phonak nebo na stránkách www.phonak.com.

Autorizovaný poskytovatel zařízení:

Distributor pro Českou republiku:

REJA spol. s r. o.

www.reja.cz

www.phonak.cz

www.sluchadla-deti.cz

www.komunikacnisystem.cz

www.audiodum.cz



Výrobce:

Sonova Communications AG

Herrenschwandweg 4

CH-3280 Murten

Švýcarsko

www.phonak.com/phonak-roger

sonova
HEAR THE WORLD

